

## ディスプレイザブル血管クランプ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


- 再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 材質

- ① 本体 :AS樹脂
- ② 軸部 :ステンレス鋼
- ③ パネ部:ステンレス鋼

##### 2. 形状・構造

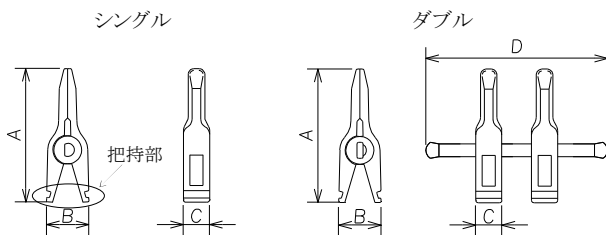

品番	シングル	S11Y	S11B	S22Y	S22B	S33Y	S33B
	ダブル	A11Y	A11B	A22Y	A22B	A33Y	A33B
色		黄	青	黄	青	黄	青
クランプ圧力 (gf)*		8 ~ 15	13.5 ~ 20	15 ~ 25	20 ~ 32.5	30 ~ 50	45 ~ 60
適用血管		静脈	静脈 動脈	静脈	静脈 動脈	静脈	静脈 動脈
適用血管径(mm)		0.4 ~ 1.0		0.6 ~ 1.5		1.0 ~ 2.25	
寸法 (mm)	A	12.6		15.3		17.3	
	B	4.5		5		5	
	C	2.6		3		3.5	
	D	16		20		21	

#### 【使用目的、効能又は効果】

- 血管の血流を遮断する器具

#### 【品目仕様等】

- キズ、ヒビが無いこと。
- クランプ圧が規格値内であること。

#### 【操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)】

- 包装を開封し、本品を包装内から取り出す。
- 本品をクランプ鑷子で把持し、適用血管部位を固定する。

#### 【使用上の注意】

- 重要な基本注意
  - ① 医療用具の目的以外には使用しないこと。
  - ② 体内へ留置しないこと。
  - ③ 包装を開封したらすぐに使用すること。(再使用禁止)

- ④ 変形した又は傷ついた本品は血管を傷つける原因になるので使用しないこと。
  - ⑤ 適用血管径にあったサイズ、機能のものを選択し使用すること。
  - ⑥ クランプ鑷子は本品にあったサイズ、機能のものを使用すること。
  - ⑦ クランプ鑷子で本品を把持するときは本品の把持部(左図参照)を把持すること。
- その他の注意
    - ① 包装が破損したり、汚染した場合は使用しないこと。
    - ② 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
    - ③ 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- ① 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避け、清潔な場所に室温で保管すること。
- ② 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- ③ 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。
- ④ 保管が適切でないと考えられる物は使用しないこと。

##### 2. 使用の期間

- ① 適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より5年。「自己認証データによる」

#### 【包装】

- 1箱 シングル 2個×6パック入り \*  
ダブル 1組×6パック入り \*

#### 【製品に対する苦情】

1. 製品の品質、安全性、信頼性、耐久性、効能効果又は性能に関する苦情は、ケイセイ医科工業(株)までご連絡下さい。
2. この製品が機能しない(たとえば規格に合致しない、期待されるような性能がない)場合、または機能しないことが疑われるような場合にも速やかにご連絡下さい。
3. この製品による、またはこの製品によると思われる患者の死または重篤な障害が起きた場合には、電話、FAX等によりただちにご連絡下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元  ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣96  
Tel:0256-92-3582 Fax:0256-92-6168  
E-Mail:tech@keiseimed.com  
ISO9001 登録証番号 JP08/040041  
ISO13485 登録証番号 JP08/040040  
「この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001及びISO13485の認証を取得した工場で製造されています。」

製造業者  ケイセイ医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-19-6  
Tel:03-3816-2811