


機械器具 (01)手術台及び治療台  
一般医療機器 : 汎用診断・処置用テーブル JMDN: 13958009

## ケイセイ手形板

### 【形状・構造及び原理等】

1. 材料  
鉛
2. 形状、構造
  - 1) 代表例

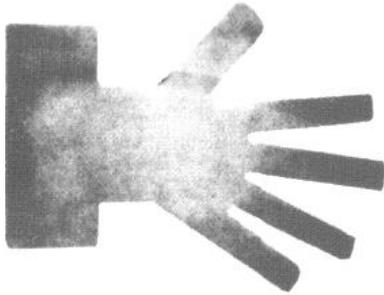

- 2) 種類  
手形板
- 3) 包装  
1個入り
3. 原理  
専用の処置台に手術が必要な部位を載せ、部位を固定することにより、必要な部位の手術が行いやすくなる。

### 【使用目的又は効果】

1. 手術が必要な部位の専用処置台として用いる。

### 【使用方法等】

1. 本品は手術又は処置が必要な手部位を載せ、他の器具又は付属品等で手を固定し、手術又は処置を行う。
2. 本品は未滅菌ですので、パッケージを取り去った後にエチレンオキサイドにて滅菌を行う。

### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品を使用するにあたっては、装置と技術に対する適切な理解が必要です。
2. 本品はオートクレーブ滅菌を行わないで下さい。[歪み、変色の原因となるため。]
3. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないこと。[器具表面を損傷し腐食(サビ)の原因となるため]

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 医療器機の使用、保守管理責任は使用者側にあります。
2. 錆を防ぐ為に以下の事をお守り下さい。
  - ① 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
  - ② 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。[腐食(サビ)の原因となるため]
  - ③ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。[腐食(サビ)や変色を防ぐため]
  - ④ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。(中性の洗剤をご使用下さい)

- ⑤ 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用すること。(家庭用洗剤は使用しないで下さい)
- ⑥ 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣 96  
Tel:0256-92-3582