

器具器械(30) 結紮器及び縫合器
 管理医療機器 : 体内用止血クリップ JMDN:34050000

ディスプレイザブル血管クランプ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品はEOG滅菌済みである。
2. 主原料
 - 1) 本体 :AS樹脂
 - 2) 軸部 :ステンレス鋼
 - 3) パネ部:ステンレス鋼

3. 形状・構造

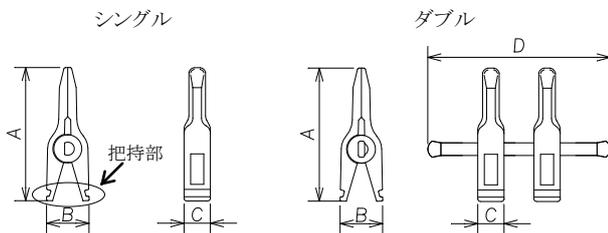

品番	シングル	S11Y	S11B	S22Y	S22B	S33Y	S33B
	ダブル	A11Y	A11B	A22Y	A22B	A33Y	A33B
色		黄	青	黄	青	黄	青
*クランプ圧力 (gf)		8 ~ 15	13.5 ~ 20	15 ~ 25	20 ~ 32.5	30 ~ 50	45 ~ 60
適用血管		静脈	静脈 動脈	静脈	静脈 動脈	静脈	静脈 動脈
適用血管径(mm)		0.4 ~ 1.0		0.6 ~ 1.5		1.0 ~ 2.25	
寸法 (mm)	A	12.6		15.3		17.3	
	B	4.5		5		5	
	C	2.6		3		3.5	
	D	16		20		21	

【使用目的又は効果】

血管の血流を遮断する器具。

【使用方法等】

本品をクランプ鑷子で把持し、適用血管部位を固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品は、手術において一時的に使用する小型鉗子であるため、体内へ留置しないこと。
 - 2) 変形した又は傷ついた本品は血管を傷つける原因になるので使用しないこと。
 - 3) 適用血管径にあったサイズ、機能のものを選択し使用すること。
 - 4) クランプのパネ部にゴム手袋や縫合糸、意図しない組織を挟まないよう注意すること。
 - 5) 縫合糸を誤って本品に通し、縫いつけないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避け、清潔な場所に室温で保管すること。
 - 2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。開封後、使用しなかったものは廃棄すること。
 - 3) 保管が適切でないと考えられる物は使用しないこと。
2. 使用の期間
 - 1) 適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より5年。「自己認証データによる。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

 ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣96
 Tel:0256-92-3582